

	Prefeitura Municipal de Antônio Carlos – SC Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social	Unidade Básica de Saúde de Antônio Carlos
POP ENF N° 010	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP	Data de elaboração: 04/2020
Elaborado por: Enf° Rafael Filipe Silveira Coren/SC: 392126	Validado e revisado por: Enf ^a Bianca Eliane da Silva (Responsável Técnica de Enfermagem) Coren/SC:476420 Deferido por: Filipe Alexandre Schmitz – Secretário Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social	Data de revisão: 06/2023
Local: Centro de Esterilização de Materiais.		
TESTE BOWIE & DICK		

I - DEFINIÇÃO

Indicador químico que monitora a etapa de validação do processo, em autoclaves com sistema de pré-vácuo, referente ao desempenho do equipamento.

II - OBJETIVO

Revelar a qualidade da penetração do vapor, a remoção do ar e vazamentos no equipamento por meio de mudança de sua coloração.

III - FINALIDADE

Fornecer materiais livres de contaminação para utilização nos diversos procedimentos clínicos e cirúrgicos e padronizar os procedimentos para o processamento de materiais.

IV - RESPONSÁVEL

Técnica em Enfermagem

V - PERIODICIDADE

Deve ser realizado na autoclave, todos os dias pela manhã e após manutenção preventiva executada por empresa de manutenção.

VI - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

1. Realizar higiene das mãos (conforme POP n. 02);
2. Utilizar EPI's;
3. Ligar a autoclave;
4. Abrir a porta posicionando a chave na indicação de porta aberta;
5. Selecionar o ciclo correspondente a B&D;
6. Fechar a porta posicionando a chave na indicação de porta fechada;
7. Rodar ciclo com autoclave vazia para aquecer o equipamento (estanquidade);
8. Abrir novamente a porta;
9. Calçar luva térmica;
10. Colocar cesto aramado invertido próximo ao dreno;
11. Colocar o pacote de teste B&D sobre o cesto;
12. Fechar a porta da autoclave;
13. Seleccione o ciclo correspondente a B&D;
14. Abrir a porta ao término do ciclo;
15. Calçar luva térmica;
16. Retirar pacote teste do interior da autoclave;
17. Aguardar resfriamento do pacote teste por mais ou menos 10 minutos;
18. Retirar a folha de teste que se encontra no centro geométrico do pacote;
19. Comparar o resultado com a amostra padrão, que deve estar afixada na parede do setor;
20. Comunicar ao enfermeiro possíveis falhas no processo;
21. Realizar a higienização das mãos (conforme POP n. 02);

22. Registrar no verso do teste o nº do ciclo, marca do aparelho, data, hora e operador;
23. Registrar resultado do teste em Livro de Ordens e Ocorrências;
24. Anexar folha de B & D em Livro de Ordens e Ocorrências.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Brasília: Anvisa, 2010.

_____. RDC nº 15 de 15/03/2012: Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Brasília: Anvisa, 2012.

COLOMBO. Prefeitura Municipal. Procedimentos Operacionais Padrão para as Unidades Básicas de Saúde. 2012

LONDRINA. Prefeitura Municipal. Procedimento Operacional Padrão: Desinfecção e Esterilização para os Serviços de Saúde. 2016.

SOBECC, Nacional. Práticas Recomendadas. Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico Recuperação Anestésica e Centro de Material de Esterilização. 4ª Edição. São Paulo, 2007.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. Maternidade Escola da UFRJ. Procedimento Operacional Padrão: Teste Bowie & Dick. Rio de Janeiro, 2014.