

	Prefeitura Municipal de Antônio Carlos – SC Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social	Unidade Básica de Saúde de Antônio Carlos
POP ENF N° 011	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP	Data de elaboração: 04/2020
Elaborado por: Enf° Rafael Filipe Silveira Coren/SC: 392126	Validado e revisado por: Enf ^a Bianca Eliane da Silva (Responsável Técnica de Enfermagem) Coren/SC:476420 Deferido por: Filipe Alexandre Schmitz – Secretário Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social	Data de revisão: 06/2023
Local: Centro de esterilização de materiais		
TESTE QUÍMICO DIÁRIO COM INTEGRADOR QUÍMICO TIPO 5		

I - DEFINIÇÃO

Indicador químico que monitora a etapa de validação do processo, referente ao desempenho do equipamento.

II - OBJETIVO

Verificar as condições relacionadas à tempo, temperatura e qualidade do vapor para o alcance da esterilização atendendo aos parâmetros estipulados.

III - FINALIDADE

Fornecer materiais livres de contaminação para utilização nos diversos procedimentos clínicos e cirúrgicos e padronizar os procedimentos para o processamento de materiais.

IV - RESPONSÁVEL

Técnica em Enfermagem

V - PERIODICIDADE

Deve ser realizado na autoclave, todos os dias pela manhã e após manutenção preventiva executada pela empresa de manutenção.

VI - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

1. Realizar higiene das mãos (conforme POP n. 02);
2. Utilizar EPI's;
3. Anotar no IQ a data de realização do teste e o número da autoclave;
4. Colocar um integrador químico no meio dos campos de algodão do pacote desafio;
5. Embalar o pacote em papel grau cirúrgico identificado com a data e número da autoclave;
6. Carregar a autoclave;
7. Dispor o pacote desafio próximo a porta;
8. Fechar a autoclave acionando o seu funcionamento;
9. Acompanhar o ciclo e registrar os dados em planilha própria;
10. Ao término do ciclo, aguardar o resfriamento do equipamento, bem como do IQ;
11. Retirar o pacote desafio;
12. Retirar o IQ e proceder a leitura:
 - a. Na faixa indicativa de cor/limite resultado interpretação mudança de cor/limite: Positivo - Houve o alcance das condições necessárias da esterilização.
 - b. Permanência da cor/limite: Negativo - Não houve o alcance das condições necessárias da esterilização*.

*condições necessárias de esterilização – parâmetros de tempo, temperatura e pressão.
13. Registrar no verso do teste o nº do ciclo, marca do aparelho, data, hora e operador;
14. Registrar resultado do teste em Livro de Ordens e Ocorrências;
15. Manter a área limpa e organizada.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Brasília: Anvisa, 2010.

_____. RDC nº 15 de 15/03/2012: Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Brasília: Anvisa, 2012.

COLOMBO. Prefeitura Municipal. Procedimentos Operacionais Padrão para as Unidades Básicas de Saúde. 2012

LONDRINA. Prefeitura Municipal. Procedimento Operacional Padrão: Desinfecção e Esterilização para os Serviços de Saúde. 2016.

SOBECC, Nacional. Práticas Recomendadas. Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico Recuperação Anestésica e Centro de Material de Esterilização. 4ª Edição. São Paulo, 2007.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Procedimento Operacional Padrão: Teste químico diário com integrador químico tipo 5 de um ciclo de esterilização a vapor saturado sob pressão. Paraná, 2015.