

	Prefeitura Municipal de Antônio Carlos – SC Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social	Unidade Básica de Saúde de Antônio Carlos
POP ENF N° 015	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP	Data de elaboração: 04/2020
Elaborado por: Enf° Rafael Filipe Silveira Coren/SC: 392126	Validado e revisado por: Enf ^a Bianca Eliane da Silva (Responsável Técnica de Enfermagem) Coren/SC:476420 Deferido por: Filipe Alexandre Schmitz – Secretário Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social	Data de revisão: 06/2023
Local: Centro de Esterilização de Materiais		
CONFEÇÃO DO PACOTE TESTE DESAFIO PARA REALIZAÇÃO DOS TESTES BIOLÓGICOS NA AUTOCLAVE		

I - DEFINIÇÃO

O pacote teste desafio é um dispositivo usado para avaliar a efetividade da performance do processo de esterilização. Representa um desafio que é igual ou maior que o desafio do item de maior dificuldade processado na rotina.

II - OBJETIVO

Promover o maior desafio possível para o ciclo de esterilização certificando que as condições essenciais para a esterilização foram alcançadas pela avaliação do desempenho e eficácia do equipamento.

III - FINALIDADE

Fornecer materiais livres de contaminação para utilização nos diversos procedimentos clínicos e cirúrgicos e padronizar os procedimentos para o processamento de materiais.

IV - RESPONSABILIDADE

Técnica em Enfermagem

V- PERIODICIDADE

Sempre, após o uso.

VI - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

1. Realizar higiene das mãos (conforme POP n. 02);
2. A confecção do pacote teste desafio é embasada nas orientações da Associação Americana para o Avanço da Instrumentação Médica;
3. Utilizar EPI's;
4. Montar o pacote teste desafio dispondo 16 campos de algodão limpos com as seguintes dimensões: - 23cm de comprimento x 23cm de largura x 15cm de altura. - dobrados no comprimento em 1/3 na dimensão mais longa - dobrados ao meio por duas vezes, posicionar os campos um sobre o outro com as dobras uma ao oposto da outra;
5. Posicionar uma unidade de Integrador Químico (IQ) ou Indicador Biológico (IB), conforme o tipo de teste a ser realizado, no centro da pilha de campos de algodão, entre o sétimo e oitavo campos;
6. Passar a fita em volta do pacote;
7. Carregar a autoclave normalmente com materiais;
8. Posicionar o pacote horizontalmente próximo ao dreno;
9. Fechar a autoclave e acionar o ciclo;
10. Acompanhar e anotar os dados do ciclo;
11. Realizar a higienização das mãos (conforme POP n. 02).

REFERÊNCIAS

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Brasília: Anvisa, 2010.

_____. RDC nº 15 de 15/03/2012: Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Brasília: Anvisa, 2012.

COLOMBO. Prefeitura Municipal. Procedimentos Operacionais Padrão para as Unidades Básicas de Saúde. 2012

LONDRINA. Prefeitura Municipal. Procedimento Operacional Padrão: Desinfecção e Esterilização para os Serviços de Saúde. 2016.

SOBECC, Nacional. Práticas Recomendadas. Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico Recuperação Anestésica e Centro de Material de Esterilização. 4ª Edição. São Paulo, 2007.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Procedimento Operacional Padrão: Confecção do pacote teste desafio para realização dos testes biológicos na autoclave. Paraná, 2015.