

	Prefeitura Municipal de Antônio Carlos – SC Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social	Unidade Básica de Saúde de Antônio Carlos
POP ENF N° 016	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP	Data de elaboração: 04/2020
Elaborado por: Enf° Rafael Filipe Silveira Coren/SC: 392126	Validado e revisado por: Enf ^a Bianca Eliane da Silva (Responsável Técnica de Enfermagem) Coren/SC:476420 Deferido por: Filipe Alexandre Schmitz – Secretário Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social	Data de revisão: 06/2023
Local: Unidade Básica de Saúde		
LIMPEZA DO REFRIGERADOR DA SALA DE VACINA E MEDICAÇÃO		

I - DEFINIÇÃO

O refrigerador no ambiente de saúde serve para armazenar medicamentos que necessitam de manutenção de temperatura (entre +2 e +8°C).

II – OBJETIVO

Estabelecer e padronizar os procedimentos a serem seguidos na limpeza do refrigerador.

III - FINALIDADE

Manter o refrigerador livre de sujidades de microorganismos patogênicos.

IV - RESPONSÁVEL

Técnicos em Enfermagem

V - PERIODICIDADE

A cada 15 dias.

Vi - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

1. Transferir os imunobiológicos para outro refrigerador, se houver, ou para uma caixa térmica com gelo reciclável, mantendo a temperatura recomendada (+2°C a +8°C) e vedar as caixas com fita gomada;
2. Desligar o congelador;
3. Realizar a limpeza interna e externa com pano umedecido em solução de água com sabão neutro
4. Secar com pano seco e limpo;
5. Passar álcool a 70% na parte externa do refrigerador;
6. Religar o congelador;
7. Manter as portas fechadas por uma hora, verificando a temperatura após esse período. Quando a mesma estiver entre +2°C e +8°C recolocar as vacinas e soros nos seus devidos lugares.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Brasília: Anvisa, 2010.

_____. RDC nº 15 de 15/03/2012: Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Brasília: Anvisa, 2012.

COLOMBO. Prefeitura Municipal. Procedimentos Operacionais Padrão para as Unidades Básicas de Saúde. 2012

LONDRINA. Prefeitura Municipal. Procedimento Operacional Padrão: Desinfecção e Esterilização para os Serviços de Saúde. 2016.

SOBECC, Nacional. Práticas Recomendadas. Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico Recuperação Anestésica e Centro de Material de Esterilização. 4ª Edição. São Paulo, 2007.